


Pokyny k ICX-záchranné sadě

Krok 1 ze 4

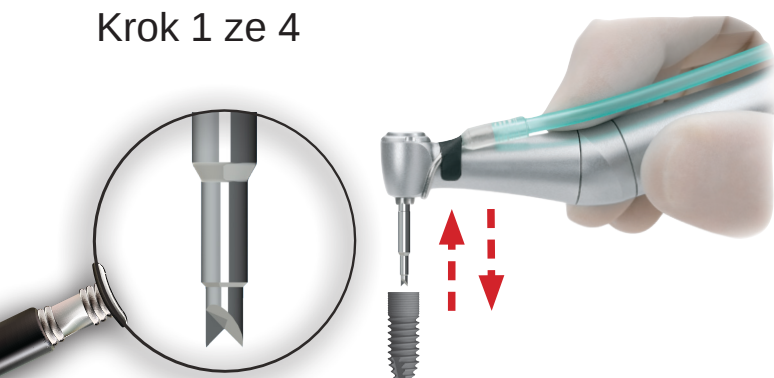

Krok 1 pouze v případě, že je šroub zlomen v jedné rovině se závitem implantátu, pomocí nástroje se krátce dotkněte zbytku šroubu ve středu bez tlaku, dokud se neotevře.

Pozor: rychlost točení cca 100 ot/min, proti směru hodinových ručiček - bez chlazení!

Krok 2 ze 4

Vložte vodicí pouzdro do implantátu pomocí držáku



Poznámka: kvůli nutnému centrování věnujte pozornost pevnému držení!

Krok 3 ze 4

Odvrtějte zbytek šroubu (citlivě, bez tlaku)




Poznámka: Zkontrolujte čas od času, zda se zbytek šroubu uvolnil ze závitu! Potom opláchněte geometrii implantátu.

Pozor: rychlost vrtání cca 350 ot/min, proti směru hodinových ručiček. Zajistěte dostatečné chlazení!

Poznámka: Pokud lze, po odstranění frakturovaného šroubu, nový šroub obtížně dotáhnout, pokračujte ke kroku 4!

Krok 4 ze 4

Obnovení závitu

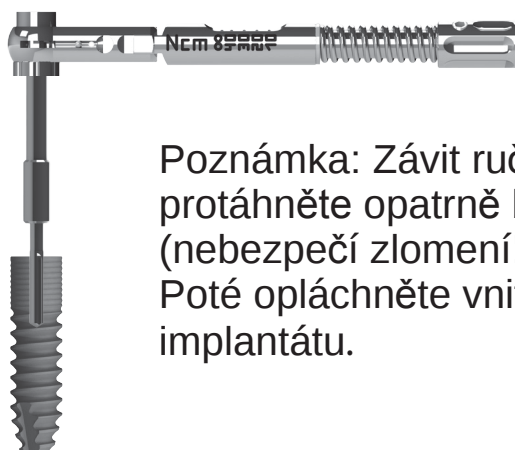

Poznámka: Závit ručně nebo s ráčnou protáhněte opatrně bez tlaku závitníkem (nebezpečí zlomení!). Poté opláchněte vnitřní geometrii implantátu.