

OPTIMÁLNÍ HOJENÍ KOSTI KOMBINOVANÉ S PERFEKTNÍ MANIPULACÍ **NanoBone® QD**



NanoBone®QD spojuje výhodu rychlé regenerace s jednoduchou manipulací.



Materiál „ready to use“ je zaveden do defektu přímo z aplikátoru. Další míchání již není nutné, což šetří čas a materiál.

PŘESVĚDČIVÉ VÝHODY:

Nový aplikátor

- „Ready to use“ přímá aplikace z aplikátoru
- Jednoduchá, intuitivní aplikace
- Přesné umístění **NanoBone®QD** materiálu
- Řízené a přesné dávkování
- Umožňuje přístup na malé místo aplikace (vnější průměr aplikátoru pouze 8 mm)
- Umožňuje retrográdní plnění kostních defektů
- Díky dlouhému aplikátoru s prodlouženým dosahem umožňuje ošetřit i obtížně přístupné kostní defekty

Vylepšený materiál

- Formovatelný a přizpůsobitelný defektu
- Lepší soudržnost materiálu (koheze)
- Lepí i na kosti (přilnavost)
- Stabilní i ve vodnatém prostředí a v silně krvácející ráně
- Kontrolovaná osteoindukce



Použití



Otočením se uvolní zadní bezpečnostní zámek a poté se vyjme.



Píst se zasune zezadu do aplikátoru a poté se opatrně tlačí dopředu, dokud nedosáhne materiálu.



Otočením se uvolní přední bezpečnostní zámek a poté se vyjme.

