

DOPORUČENÉ HODNOTY TOČIVÝCH MOMENTŮ



5 Ncm až 10 Ncm (ruční manipulace)	
Krycí šroubky	
Vhojovací válečky	
Otiskovací pilíře	
Suprastuktury z plastu	

DOPORUČENÉ HODNOTY TOČIVÝCH MOMENTŮ



max. 15 Ncm

Skenovací pilíře a
všechny suprastruktury
PEEK



DOPORUČENÉ HODNOTY TOČIVÝCH MOMENTŮ



max. 30 Ncm	
Všechny titanové abutmenty	
Lepicí báze	
CERICX	
T-bona kulové hlavy	
Maximus	
ICX-multi systém	(šroubek okluzálního spoje cca s 27 Ncm)

DOPORUČENÉ HODNOTY TOČIVÝCH MOMENTŮ

Nástroje:



ICX-implantáty	
Běžná inserce: ne méně než 15 Ncm a ne více než 55 Ncm.	
Okamžitá implantace: ne méně než 35 Ncm.	
ICX-ACTIVE MASTER implantáty v interforaminální oblasti ne více než 40 Ncm.	