


## ICX-MINI<sup>®</sup>- dvoudílné - možnosti dodání:

- ▶ ICX-MINI implantát Ø 2.9mm sestává ze 2 částí s již upevněným kulovým abutmentem s kuličkou 1mm. Výška gingivy může být nastavena kuličkou 2 a 3mm na požadovaný profil.




- ▶ Navíc může být dodáno společně s hybridním dvoudílným ICX-MAXIMUS GH 3mm,

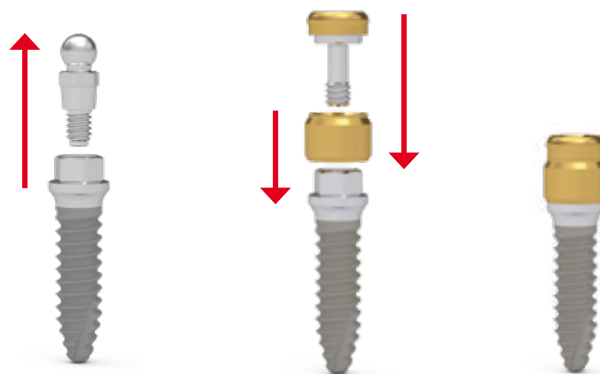

- ▶ Pro cementované práce lze použít v ústech pacienta kapnu nasazenou přes kulovou hlavu na spodní část šestiúhelníku pod kuličkou, nad vnější šestiúhelník na plošině implantátu.

Přenos do laboratoře se ukuteční pomocí intraorálního skenování nebo klasického otiskování / modelu technika.

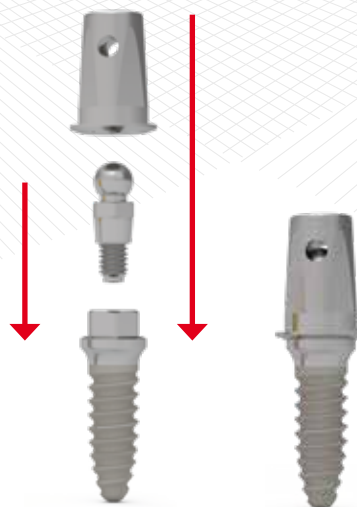


## ICX-MINI Ø 2.9mm implantát

ICX-MINI implantát bílý, Ø 2.9mm

Obj. číslo

C-001-290080	ICX-MINI Ø 2.9 x 8mm
C-001-290100	ICX-MINI Ø 2.9 x 10mm
C-001-290125	ICX-MINI Ø 2.9 x 12.5mm

**Upozornění:** používejte pouze-003-000004 ICX-mini uzavírací šroubek!  
1mm kuličku

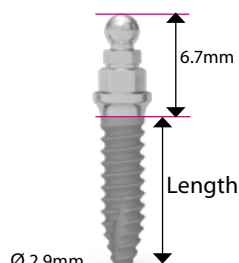

Inzerční nástroj: C-015-100006  
pro inzerci:



Demontáž kuličky:  
kontra nástroj: C-015-100009



Inzerční nástroj: C-015-100007  
Montáž kuličky:



Hex nástroj: 960002

uzavírací šroubek



## Přehled/protetiky: mini-implantát ICX-MINI Ø 2.9mm

Obj. číslo:		Položka	Velikost	Materiál
C-003-000004		ICX-MINI krycí kapna, (viz poznámka 1!) Fixuje se nástrojem 96 0002	-	titan
C-022-090001		t-bona kulička mini, kulička - Ø 2.25mm, včetně modelového analogu	GH 1mm	titan
C-022-090002		t-bona kulička mini, kulička - Ø 2.25mm, včetně modelového analogu	GH 2mm	titan
C-022-090003		t-bona kulička mini, kulička - Ø 2.25mm, včetně modelového analogu	GH 3mm	titan
C-026-010501		ICX-MINI massive abutment (Pevná dorazová kapna je nacementovaná v ústech pacienta. Tato pozdější pevná opěra může být následně obroušena a konvenčně tvarována pro jedno- zubé výplně).	Ø 5mm K 7mm	titan

**Poznámka 1:** Utahovací moment 5 až 10Ncm by neměl být překročen. Všechny šrouby ICX-mini zašroubujte pouze rukou. Hrozí nebezpečí, že pokud je zašroubujete pomocí 20 nebo více Ncm, vytvoří se kónické síly, které znemožní pozdější uvolnění.

**Poznámka:** GH = výška gingivy

## ICX-Maximus-abutment pro ICX-MINI Ø 2.9mm\*\*

Obj. číslo		Položka	Materiál
C-031-030001		ICX-MAXIMUS pro ICX-mini, sestává z pouzdra GH 3mm a šroubku	titan

\*\* Dvoudílný ICX maximus abutment je vlastní další vývoj medentis medical a je kompatibilní s matricemi LOCATOR™.