

ICX-ALL-IN-ONE VRTÁK

VRTEJTE A KONDENZUJTE
KOST STEJNÝM VRTÁKEM!



Náskok díky inovacím.

medentis
medical

ICX-ALL-IN-ONE VRTÁK




Zploštělý design hlavy umožňuje kondenzaci a autotransplantaci.

Vrtáky ICX-ALL-IN-ONE


během operace postupně rozšiřují průměry a jsou navrženy tak, aby je bylo možné použít se standardním chirurgickým vybavením k zachování a kondenzaci kosti při otáčení proti směru hodinových ručiček (kompresní režim 50-150 ot/min) a v případě potřeby kost přesně vrtat otáčením ve směru hodinových ručiček (režim řezání 800 ot/min / pilotní vrták a 400 ot/min / normální vrták).

Proti směru hodinových ručiček, zhutňující směr

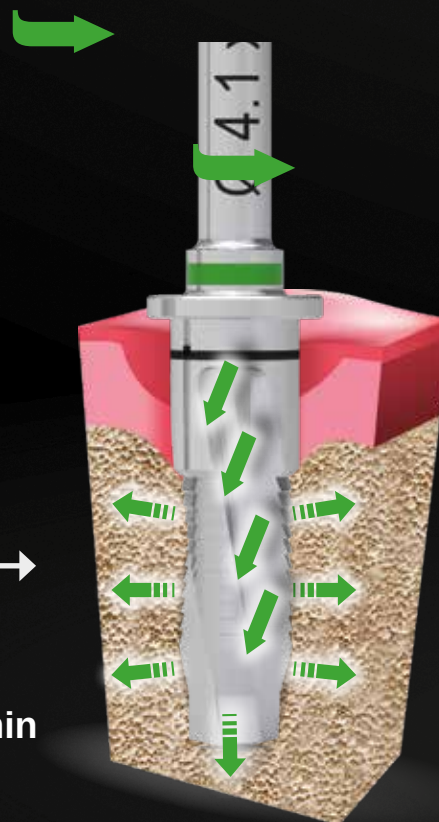

Mód zhutňování
(50-150 ot/min)

Po směru hodinových ručiček, řezný směr

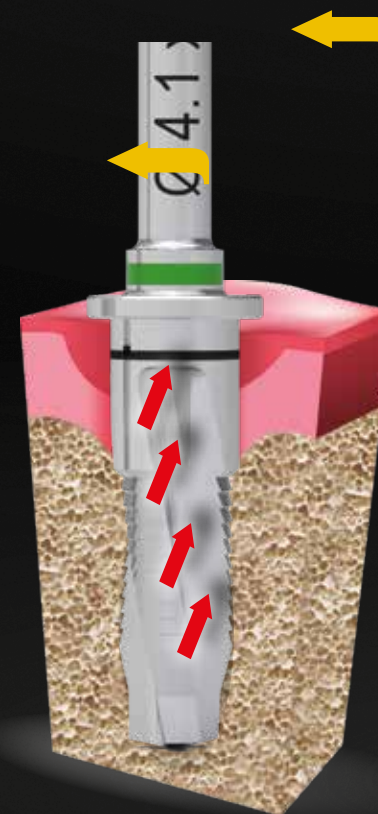

Mód řezání
(400-800 ot/min)

ICX-ALL-IN-ONE VRTÁK

Pracovní postup navržený společností medentis medical je pouze doporučením.

Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny kvality kostí, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.



www.medentis.de

medentis
medical

Ø 2,9mm D2/D3/D4

Posup vrtání pro velmi měkkou /měkkou/ středně tvrdou kost.
Tento postup je stejný pro všechny délky.


Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

Řezání 2-4 mm ←

D2/D3/D4-vrták,
1 proužek

pilotní vrták

Zhutňovat až na
značku hloubky →
D2/D3/D4-vrták,
1 proužek

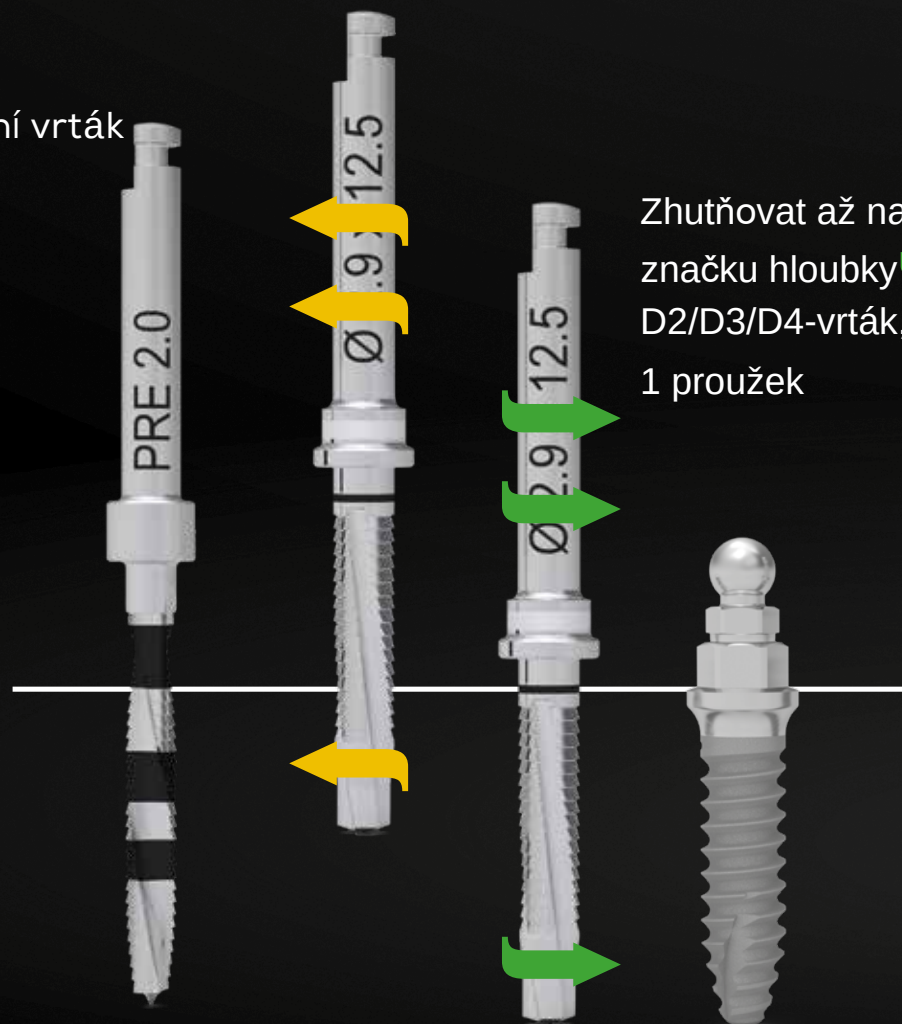

ICX-ALL-IN-ONE
VRTÁK

Ø 2,9mm D1

Postup vrtání pro tvrdou kost

Používejte pouze vrtáky se třemi černými proužky!

Tento postup je stejný pro všechny délky.

pilotní vrták



D1-vrták
3 černé proužky



medentis
medical

www.medentis.de

Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny kvality kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

Ø 3,3mm D2/D3/D4

Postup vrtání pro velmi měkkou/měkkou/ středně tvrdou kost.

Tento postup je stejný pro všechny délky.

2-4mm řezat ←

D2/D3/D4-vrták,
1 proužek

pilotní vrták

Postup vrtání navržený společností medentismedical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů avšak všechny kvality kosti, že navržená sekvence vrtání semůže měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje

Zhutňovat až na značku
hloubky →

D2/D3/D4-vrták,
1 proužek

ICX-ALL-IN-ONE
VRTÁK

Ø 3,3mm D1

Postup vrtání pro tvdou kost.

Používejte pouze vrták se třemi růžovými proužky!

Tento postup je stejný pro všechny délky.

pilotní vrták



D1-vrták,
3 růžové proužky



medentis
medical

www.medentis.de

Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

Ø 3,45mm D2/D3/D4

Postup vrtání pro velmi měkkou/měkkou/středně tvrdou kost.

Tento postup je stejný pro všechny délky.


Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkkší kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

ICX-ALL-IN-ONE
VRTÁK

2-4mm řezání ↩

D2/D3/D4-vrták,
1 proužek

pilotní vrták

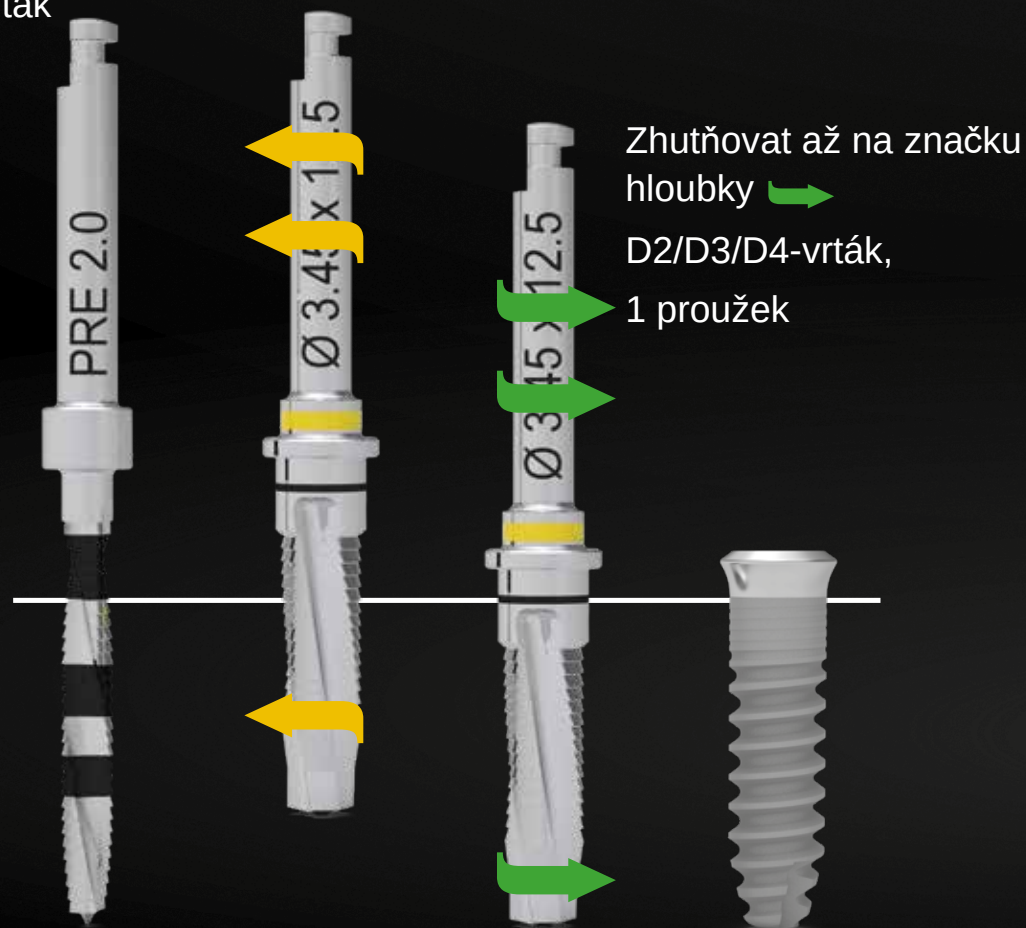

Ø 3,45mm D1

Postup vrtání pro tvrdou kost.


Používejte pouze vrták se třemi žlutými proužky!

Tento postup je stejný pro všechny délky.

pilotní vrták



D1-vrták,
3 žluté proužky

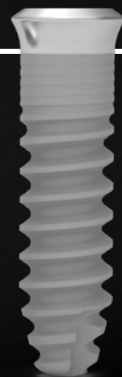

medentis
medical

www.medentis.de

Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

Ø 3,75mm D2/D3/D4

Postup vrtání pro velmi měkkou/měkkou/středně tvrdou kost.

Tento postup je stejný pro všechny délky.

2-4mm řezat ←

D2/D3/D4-vrták,
1 proužek

pilotní vrták

Zhutňovat až na značku
hloubky →

D2/D3/D4-vrták,
1 proužek

Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

ICX-ALL-IN-ONE
VRTÁK

Ø 3,75mm D1

Postup vrtání pro tvrdou kost.


Používejte pouze vrták se třemi červenými proužky!

Tento postup je stejný pro všechny délky.

D1-vrták
3 červené proužky

pilotní vrták

Použijte dle
vlastního
uvážení

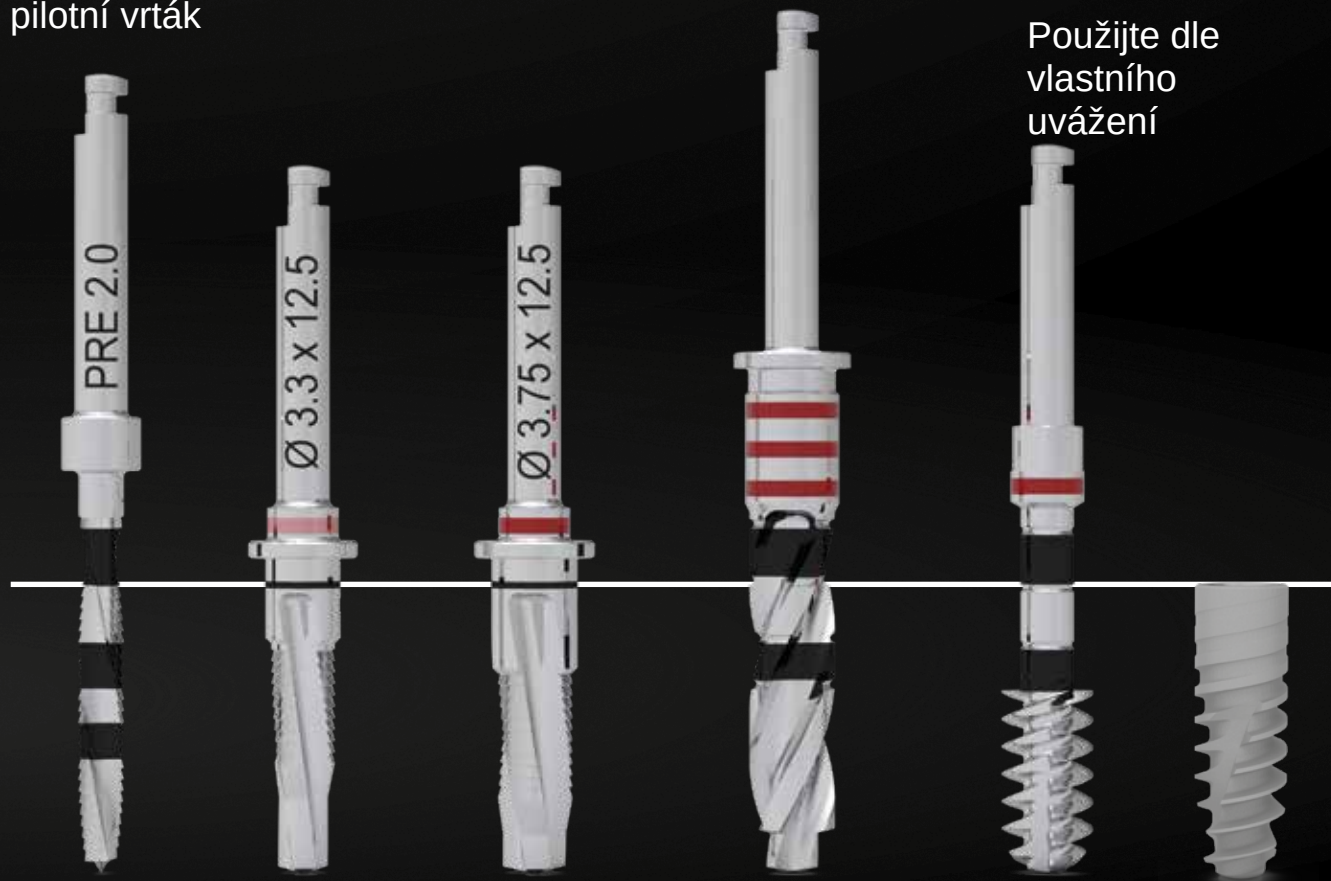

medentis
medical

www.medentis.de

Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje. .

Ø 4,1mm D2/D3/D4


Postup vrtání

pro velmi měkkou/měkkou/středně tvrdou kost.

Tento postup je stejný pro všechny délky.

Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

ICX-ALL-IN-ONE
VRTÁK

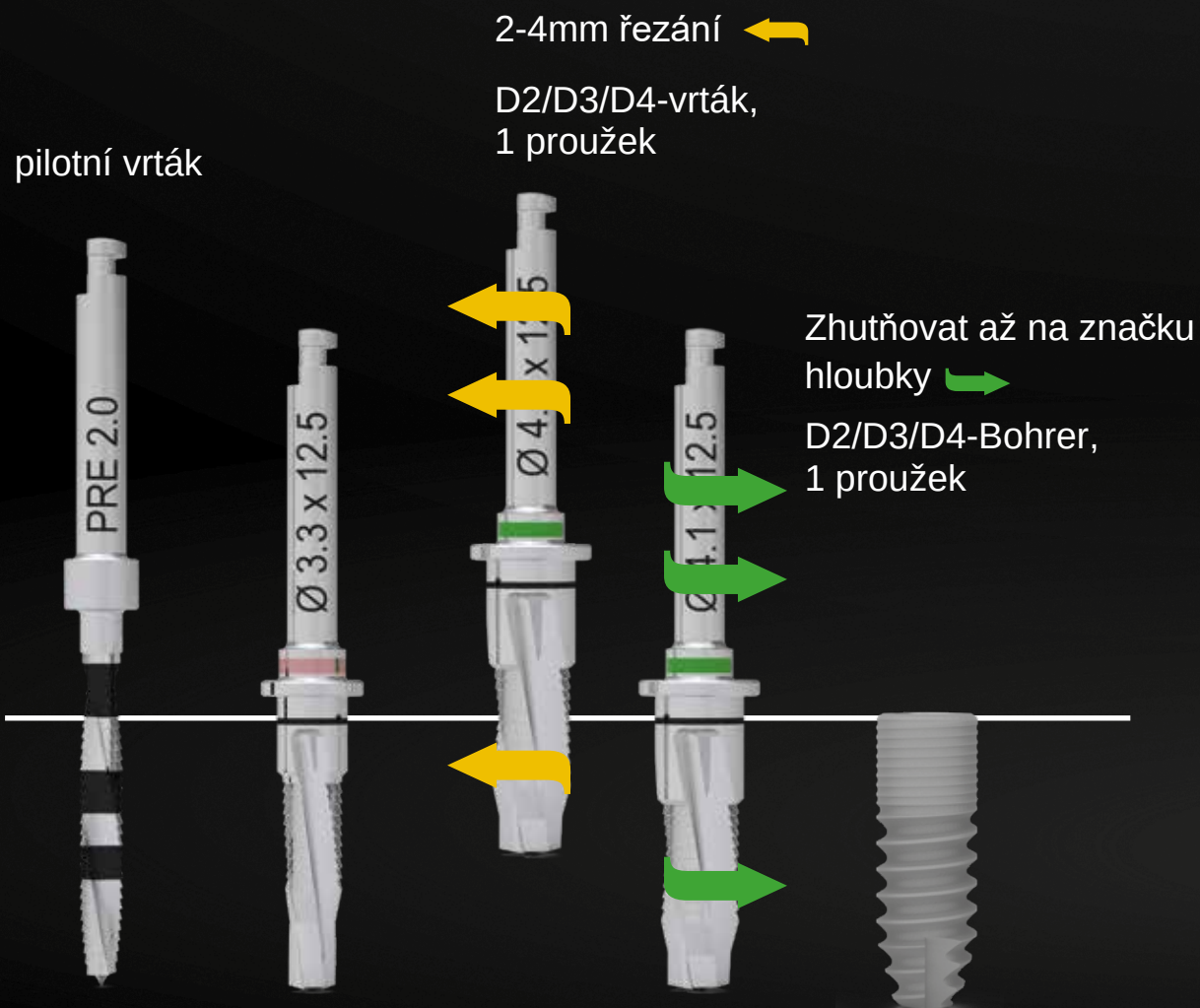

Ø 4,1mm D1

Postup vrtání pro tvrdou kost.


Používejte pouze vrták se třemi zelenými proužky!

Tento postup je stejný pro všechny délky.

D1-vrták
3 zelené proužky

pilotní vrták

Použijte dle
vlastního
uvážení

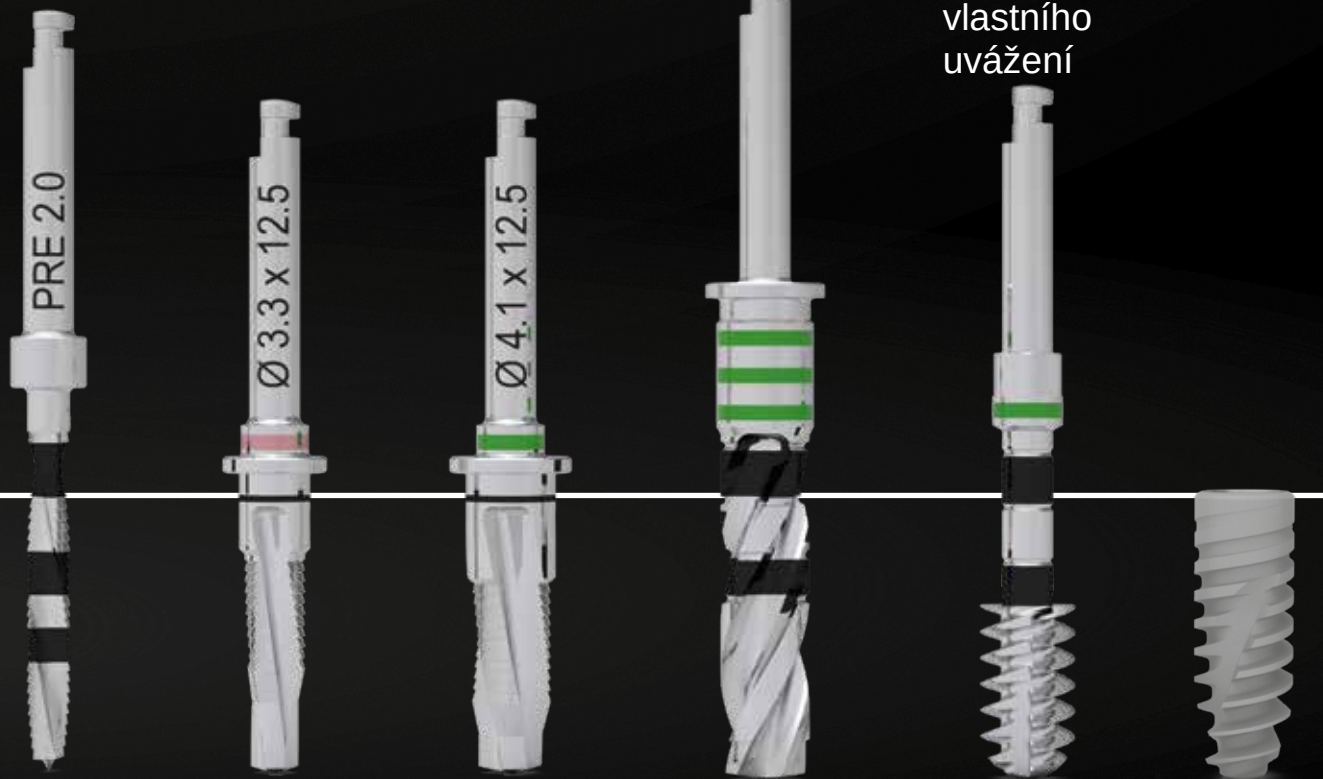

medentis
medical

www.medentis.de

Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

Ø 4,8mm D2/D3/D4

Postup vrtání

pro velmi měkkou/měkkou/ středně tvrdou kost.

Tento postup je stejný pro všechny délky.

Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

ICX-ALL-IN-ONE
VRTÁK




Ø 4,8mm D1

Postup vrtání pro tvrdou kost

Zde prosím používejte pouze vrtáky se 3 modrými proužky

Tento postup je stejný pro všechny délky.

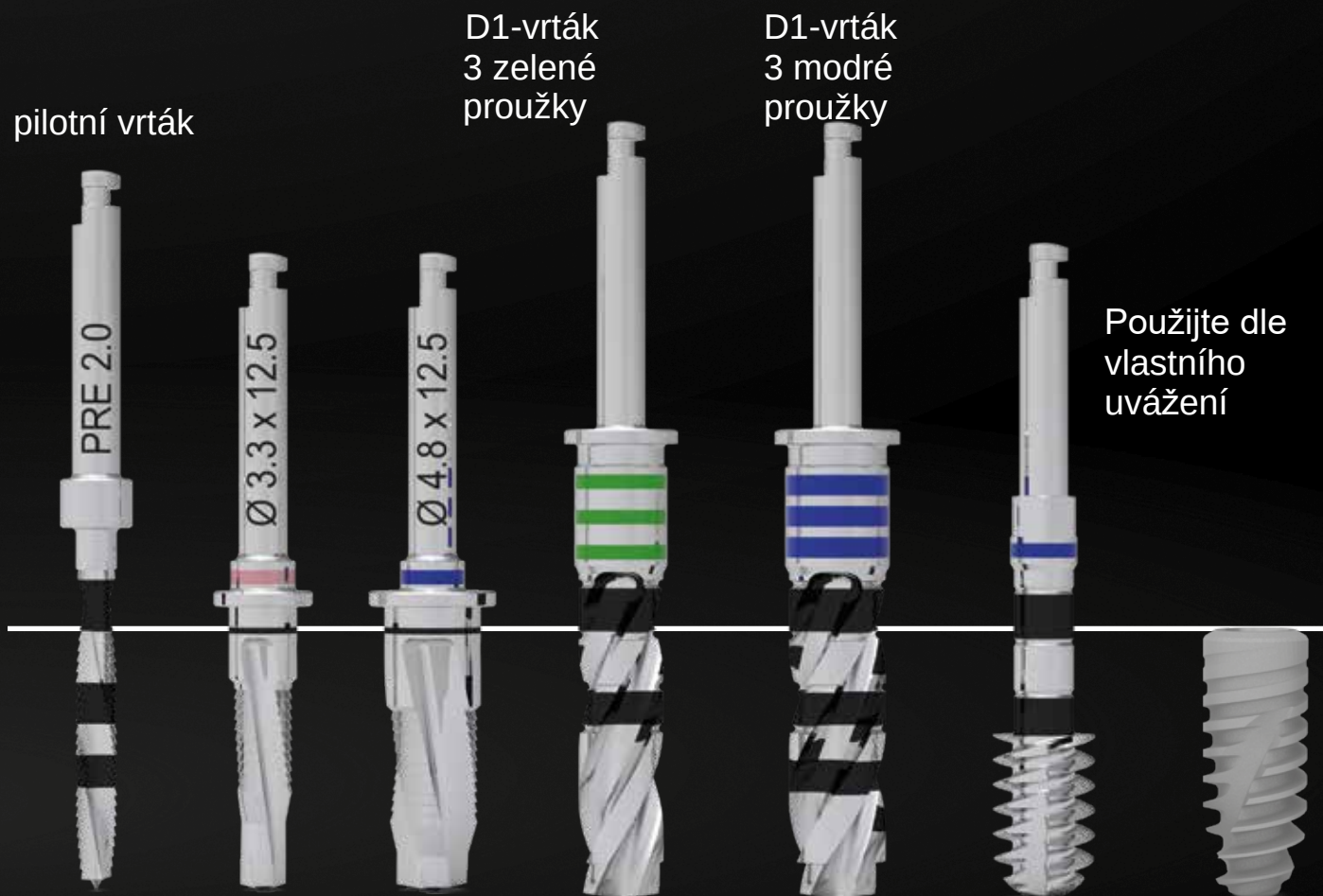

medentis
medical

www.medentis.de

Postup vrtání navržený společností medentis medical je pouze doporučením. Obecně platí pro všechny vrtáky, všechny průměry implantátů a všechny třídy kosti, že navržená sekvence vrtání se může měnit dle situace: čím měkčí kost, tím méně kroků se doporučuje. Čím tvrdší kost, tím více kroků se doporučuje.

ICX-ALL-IN-ONE CHIRURGICKÝ BOX




Náskok díky inovacím

medentis
medical



ICX-ALL-IN-ONE CHIRURGICKÝ BOX

ICX-ALL-IN-ONE CHIRURGICKÝ BOX | OBSAH

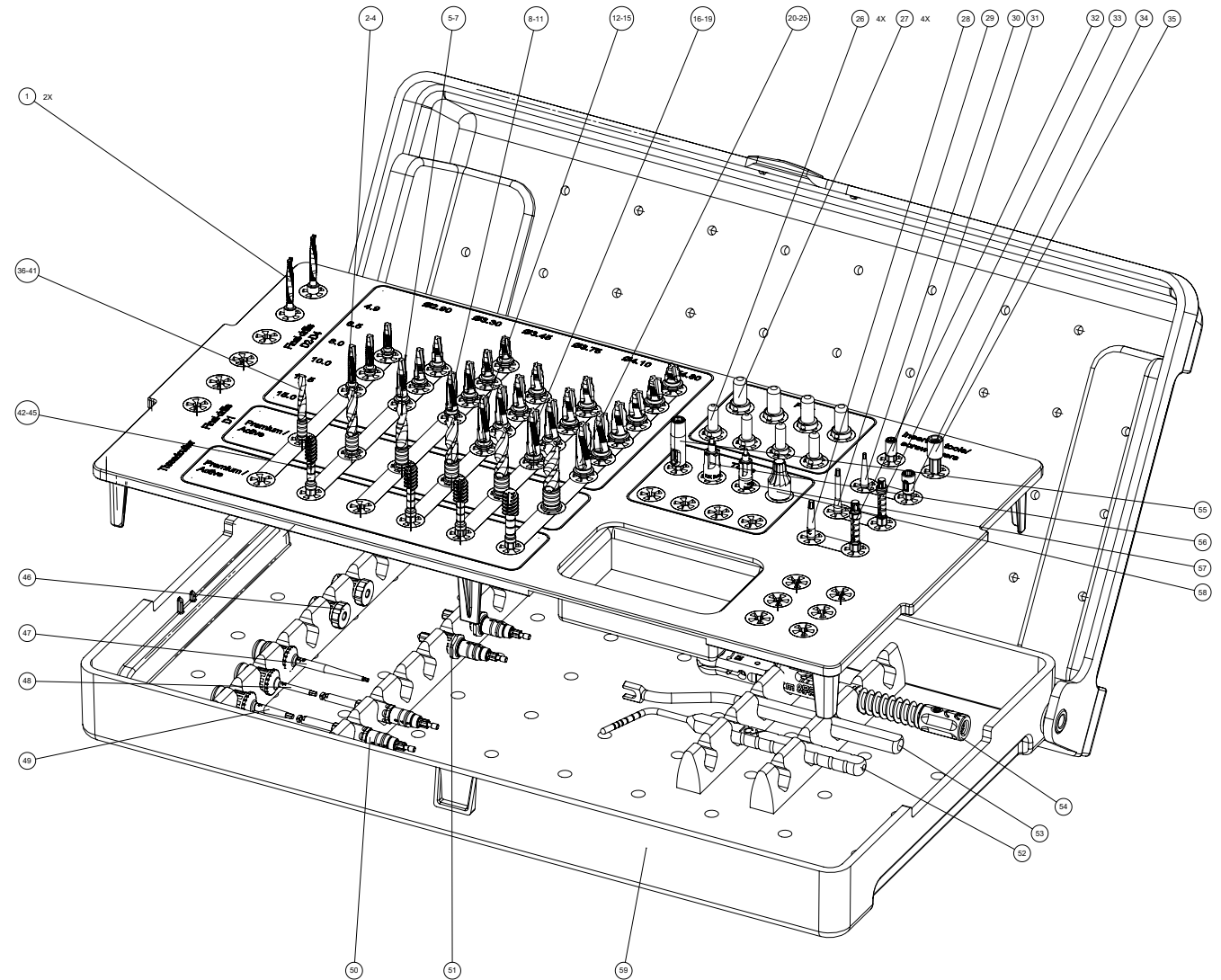

ICX-ALL-IN-ONE CHIRURGICKÝ BOX


OBSAH

Pozice position no.	Množství quantity	Obj. číslo. item no.	Označení item	Popis description
1	2	AIO-014-200000	pilotní vrták All in one	Ø 2,0
2	1	AIO-014-290125	vrták All in one	Ø 2,9 x 12,5
3	1	AIO-014-290100	vrták All in one	Ø 2,9 x 10
4	1	AIO-014-290080	vrták All in one	Ø 2,9 x 8
5	1	AIO-014-330125	vrták All in one	Ø 3,3 x 12,5
6	1	AIO-014-330100	vrták All in one	Ø 3,3 x 10
7	1	AIO-014-330080	vrták All in one	Ø 3,3 x 8
8	1	AIO-014-345125	vrták All in one	Ø 3,45 x 12,5
9	1	AIO-014-345100	vrták All in one	Ø 3,45 x 10
10	1	AIO-014-345080	vrták All in one	Ø 3,45 x 8
11	1	AIO-014-345065	vrták All in one	Ø 3,45 x 6,5
12	1	AIO-014-375150	vrták All in one	Ø 3,75 x 15
13	1	AIO-014-375125	vrták All in one	Ø 3,75 x 12,5
14	1	AIO-014-375100	vrták All in one	Ø 3,75 x 10
15	1	AIO-014-375080	vrták All in one	Ø 3,75 x 8
16	1	AIO-014-410150	vrták All in one	Ø 4,1 x 15
17	1	AIO-014-410125	vrták All in one	Ø 4,1 x 12,5
18	1	AIO-014-410100	vrták All in one	Ø 4,1 x 10
19	1	AIO-014-410080	vrták All in one	Ø 4,1 x 8
20	1	AIO-014-480150-01	vrták All in one	Ø 4,8 x 15
21	1	AIO-014-480125	vrták All in one	Ø 4,8 x 12,5
22	1	AIO-014-480100	vrták All in one	Ø 4,8 x 10
23	1	AIO-014-480080	vrták All in one	Ø 4,8 x 8
24	1	AIO-014-480065	vrták All in one	Ø 4,8 x 6,5
25	1	AIO-014-480049	vrták All in one	Ø 4,8 x 4,9
26	4	C-014-230315	paralelní pin	D=2,3/3.15mm
27	4	C-014-350410	paralelní pin	D=3,5/4.1mm
28	1	950099	šroubovák ISO dřík	hex 1.4mm L=24mm
29	1	C-015-100033	šroubovák ISO dřík	hex 1.2mm L=25mm
30	1	960002	šroubovák ISO dřík	hex 0.9mm L=20mm

31	1	C-015-100007	ICX t-bona zavaděč ISO dřík	ICX T-bona šroubek
32	1	C-015-100040	ICX zavaděč s kulovou západkou ISO dřík	L=30mm
33	1	N-015-100040	ICX-3,3 zavaděč s kulovou západkou ISO dřík	L=28mm
34	1	C-015-100006	ICX-Mini zavaděč ISO dřík Multi	
35	1	C-020-000001	Multi zavaděč ISO dřík	L=24mm
36	1	AIO-014-007480	vrták All in one	Ø 4,8, D1
37	1	AIO-014-007410	vrták All in one	Ø 4,1, D1
38	1	AIO-014-007375	vrták All in one	Ø 3,75, D1
39	1	AIO-014-007345	vrták All in one	
40	1	AIO-014-007290	vrták All in one	
41	1	AIO-014-007330	vrták All in one	Ø 3,3, D1
42	1	AIO-014-004480	All in one závitník	Ø 4,8
43	1	AIO-014-004410	All in one závitník	Ø 4,1
44	1	AIO-014-004330	All in one závitník	Ø 3,3
45	1	AIO-014-004375	All in one závitník	Ø 3,75
46	2	960007	Univerzální adaptér pro ráčnu	
47	1	C-015-100029	šroubovák	hex 0.9mm L=38.5mm
48	1	C-015-100030	šroubovák	hex 1.2mm L=26.4mm
49	1	C-015-100025	šroubovák	hex 1.4mm L=26.4mm
50	2	C-015-110000	ICX zavaděč úzký	L=17.8mm
51	2	C-015-100000	ICX zavaděč	
52	1	C-015-100003	měrka hloubky vrtu	
53	1	C-015-100009	ICX-Mini kontraktič	
54	1	960001	Momentová ráčna	
55	1	960004	Prodloužení vrtáku	
56	1	C-014-006002	Zahlubovací fréza	
57	1	C-014-006003	ICX 3.3 zahlubovací fréza	rosa /růžová
58	1	C-014-000003	Křestální fréza	
59	1	C-018-100000	ICX All in One Box	prázdný

ICX-ALL-IN-ONE VRTÁK

Proti směru hodinových
ručiček, zhutňující směr

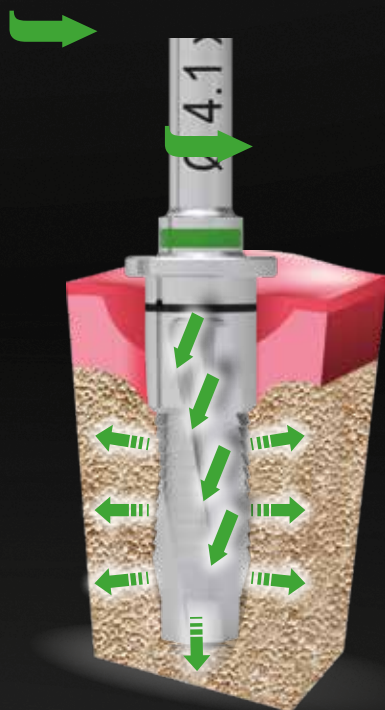

Mód zhutnění
(50-150 ot./min)

Po směru hodinových
ručiček, řezný směr



Mód řezný
(400-800 ot./min)

**VRTEJTE A
KONDENZUJTE KOST
STEJ NÝM VRTÁKEM!**

Náskok díky inovacím.

medentis
medical

www.medentis.de