

ICX-3.3 IMPLANTÁT

PREMIUM & ACTIVE MASTER



BE SMART. BE ICX.

OBSAH

strana

ICX-3.3 Bonelevel (BL) & Tissuelevel (TL)-implantáty & chirurgické boxy.....3-6

ICX-PREMIUM 3.3 BL & TL IMPLANTÁTY – CHIRURGICKÝ PROTOKOL 8

Chirurgický postup **ICX-PREMIUM**

BL & TL IMPLANTÁTY Ø 3.3mm.....9-12

ICX-ACTIVE MASTER 3.3 BL & TL IMPLANTÁTY – CHIRURGICKÝ PROTOKOL.....14

Chirurgický postup **ICX-ACTIVE MASTER**

BL & TL IMPLANTÁTY Ø 3.3mm.....15-18

ICX-3.3 IMPLANTÁT

BL & TL PREMIUM & ACTIVE MASTER


DIGITAL. DENTAL. FINAL.

medentis
medical

ICX-3.3 IMPLANTÁT

BL & TL PREMIUM & ACTIVE MASTER

V ICX-3.3 implantáty s redukováním průměrem dokonale zapadají do úzkých mezizubních prostor nebo do tenkých kostí. Je minimálně invazivní, předvídatelný, ekonomický, spolehlivý a s esteticky velmi dobrým výsledkem.

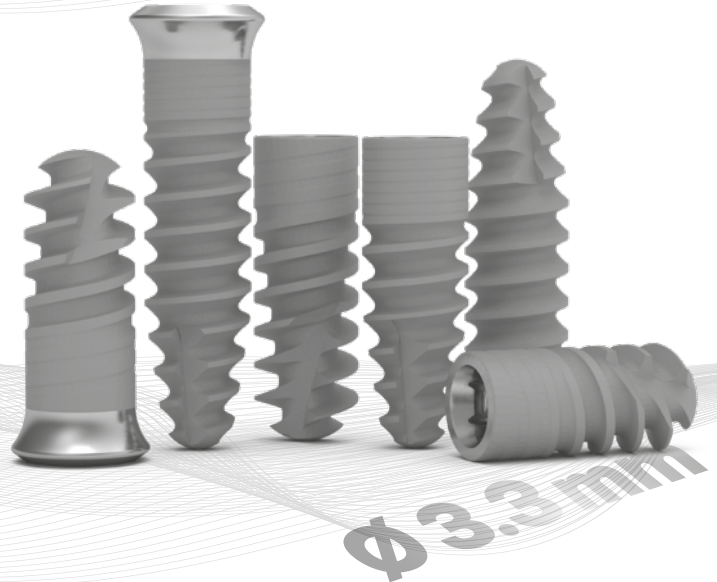


VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI IMPLANTÁTŮ ICX-Ø 3.3 MM




Implantáty ICX-PREMIUM- Ø 3.3mm a implantáty ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm otevírají zcela nové možnosti v použití implantátů s redukováním průměrem!

Rozšiřujeme rodinu ICX o implantát s redukováním průměrem. Ten pokrývá další indikace s obvyklou vysokou kvalitou a přesností typického ICX spojení implantát-abutment.

Aby bylo možné takové spojení zaručit, byla vyvinuta zcela nová protetická řada.

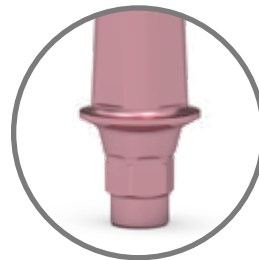

Cílem bylo vytvořit implantát, který lze použít v hraničních případech bez kompromisů ve stabilitě.

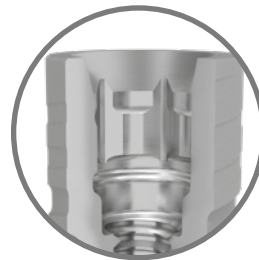

Nyní tak můžete snadněji řešit složité případy a spolehnout se na implantáty ICX-PREMIUM Ø 3.3mm a ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

ICX-PREMIUM Ø 3.3mm a ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm implantáty **NESMÍ** být používány se standardní ICX protetikou!

ICX-Ø 3.3mm implantáty mají jinou vnitřní geometrii než ICX-PREMIUM & ICX-ACTIVE-MASTER s průměry červeným Ø 3,75mm, zeleným Ø 4,1mm a modrým Ø 4.8mm. Tyto implantáty mají vlastní protetickou řadu.

Barva Ø 3.3mm je růžová!




ICX-BL & TL Ø 3.3mm implantáty

ICX-PREMIUM Ø 3.3mm implantáty (BL)

Obj.číslo

C-001-330080	ICX-PREMIUM Ø 3.3 · L 8mm
C-001-330100	ICX-PREMIUM Ø 3.3 · L 10mm
C-001-330125	ICX-PREMIUM Ø 3.3 · L 12.5mm

Ø 3.3mm

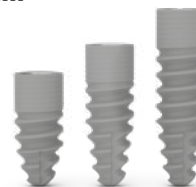


ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm implantáty (BL)

Obj.číslo

ACM-001-330080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3 · L 8mm
ACM-001-330100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3 · L 10mm
ACM-001-330125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3 · L 12.5mm

Ø 3.3mm

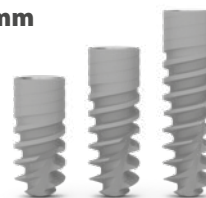


ICX-PREMIUM Ø 3.3mm implantáty (TL)

Obj.číslo

T-001-330080	ICX-PREMIUM TissueLine implantátat Ø 3.3 x 8mm
T-001-330100	ICX-PREMIUM TissueLine implantátat Ø 3.3 x 10mm
T-001-330125	ICX-PREMIUM TissueLine implantátat Ø 3.3 x 12.5mm

Ø 3.3mm

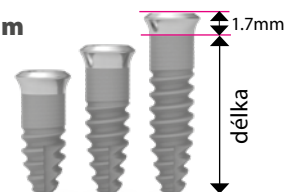


ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm implantáty (TL)


Obj.číslo

TAM-001-330080	ICX-ACTIVE MASTER TissueLine implantátat Ø 3.3 x 8mm
TAM-001-330100	ICX-ACTIVE MASTER TissueLine implantátat Ø 3.3 x 10mm
TAM-001-330125	ICX-ACTIVE MASTER TissueLine implantátat Ø 3.3 x 12.5mm


Ø 3.3mm

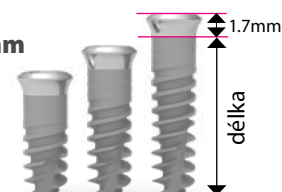


ICX-PREMIUM Ø 3.3mm vrtáky

Obj.číslo	ICX-PREMIUM Ø 3.3 vrtáky	Produkt
C-014-003330		ICX-PREMIUM paralelní vrták měkká kost Ø 3.3 růžový I ●
C-014-006330		ICX-PREMIUM paralelní vrták standard Ø 3.3 růžový II ●
C-014-007330		ICX-PREMIUM paralelní vrták hard Ø 3.3 růžový III ●
C-014-005330		ICX-PREMIUM zahlubovací fréza Ø 3.3 růžová ●


ICX-PREMIUM chirurgický box

Obj.číslo	ICX-PREMIUM chirurgický box (včetně nástrojů)
C-018-100003	<p>ICX-PREMIUM chirurgický box (včetně nástrojů)</p> 


ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm vrtáky

Obj.číslo	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3 vrtáky	Produkt
ACM-014-003330		ICX-ACTIVE-MASTER paralelní vrták měkká kost Ø 3.3 růžový I ●
ACM-014-006330		ICX-ACTIVE-MASTER paralelní vrták standard Ø 3.3 růžový II ●
ACM-014-007330		ICX-ACTIVE-MASTER paralelní vrták tvrdá Ø 3.3 růžový III ●
ACM-014-005330		ICX-ACTIVE-MASTER STOP drill Ø 3.3 růžový ●

ICX-ACTIVE-MASTER chirurgický box


Obj.číslo	ICX-ACTIVE-MASTER chirurgický box (včetně nástrojů)
ACM-018-000006	<p>ICX-ACTIVE-MASTER chirurgický box (včetně nástrojů)</p> 

POZOR! DŮLEŽITÁ INFORMACE!

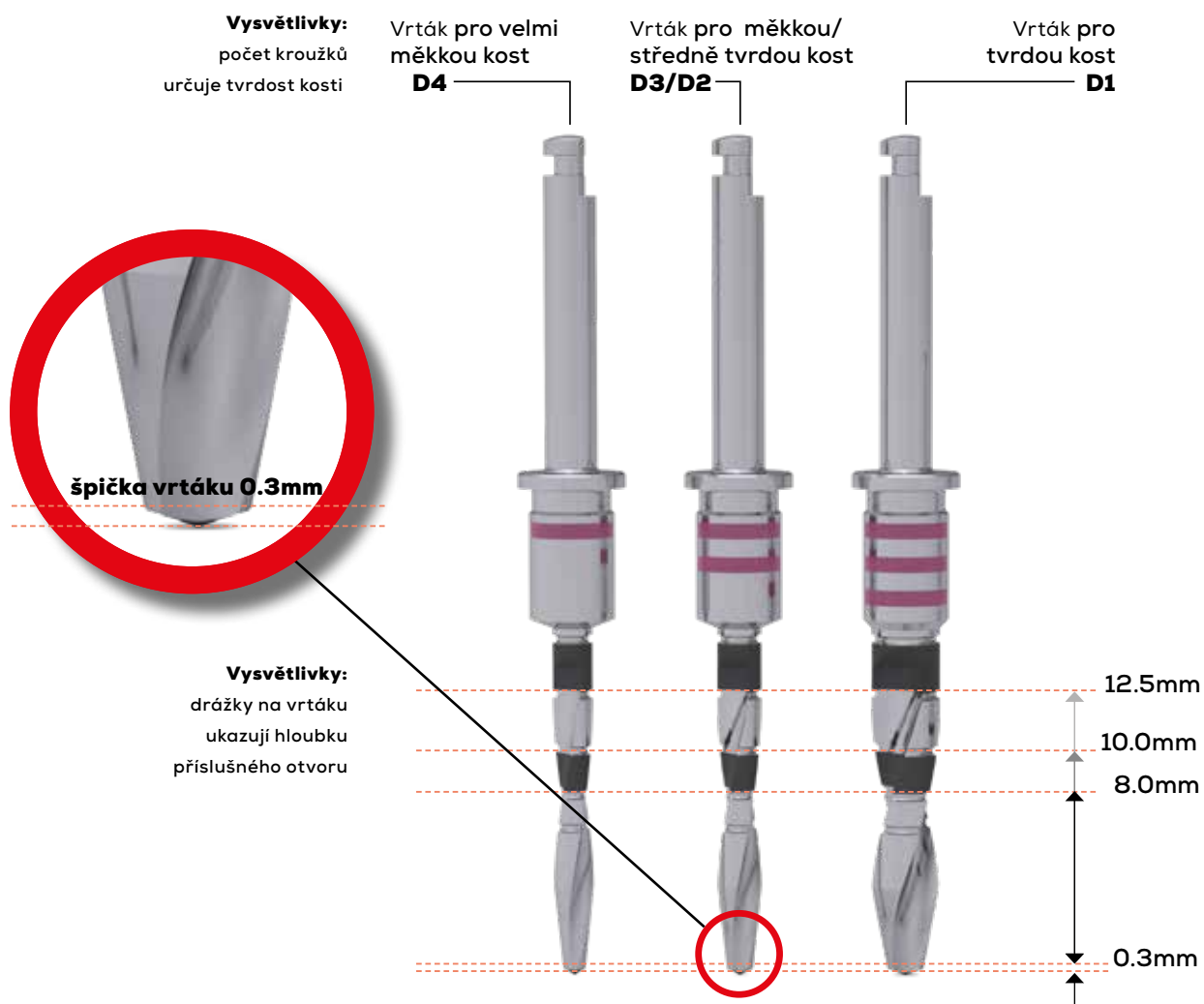

U vrtáků ICX-Ø3.3mm je délka vrtáku o 0.3mm delší (špička vrtáku). Při práci v oblasti důležitých anatomických struktur je nutné zajistit, aby tato dodatečná délka byla přípustná.

medentis[®]
medical

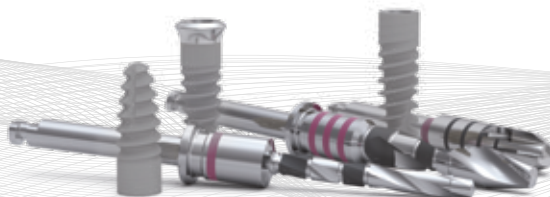

PŘEHLED - CHIRURGICKÝ PROTOKOL

pro ICX-PREMIUM 3.3

BL & TL Ø 3.3mm implantáty

MĚKKÁ KOST

Krok	Popis	Objednací číslo
1	Pilotní vrták	FIL-186RF
2	ICX-PREMIUM 3.3 paralelní vrták měkká kost I	C-014-003330
3	ICX-PREMIUM 3.3 zahlubovací fréza	C-014-005330

STŘEDNĚ TVRDÁ KOST

Krok	Popis	Objednací číslo
1	Pilotní vrták	FIL-186RF
2	ICX-PREMIUM 3.3 paralelní vrták standard II	C-014-006330
3	ICX-PREMIUM 3.3 zahlubovací fréza	C-014-005330

TVRDÁ KOST


Krok	Popis	Objednací číslo
1	Pilotní vrták	FIL-186RF
2	ICX-PREMIUM 3.3 paralelní vrták standard II	C-014-006330
3	ICX-PREMIUM 3.3 paralelní vrták tvrdá kost III	C-014-007330
4	ICX-PREMIUM 3.3 zahlubovací fréza	C-014-005330

ICX-3.3 IMPLANTÁT

PREMIUM

ICX-PREMIUM BL & TL Ø 3.3mm implantáty

Chirurgický postup **ICX-PREMIUM** BL & TL Ø 3.3mm

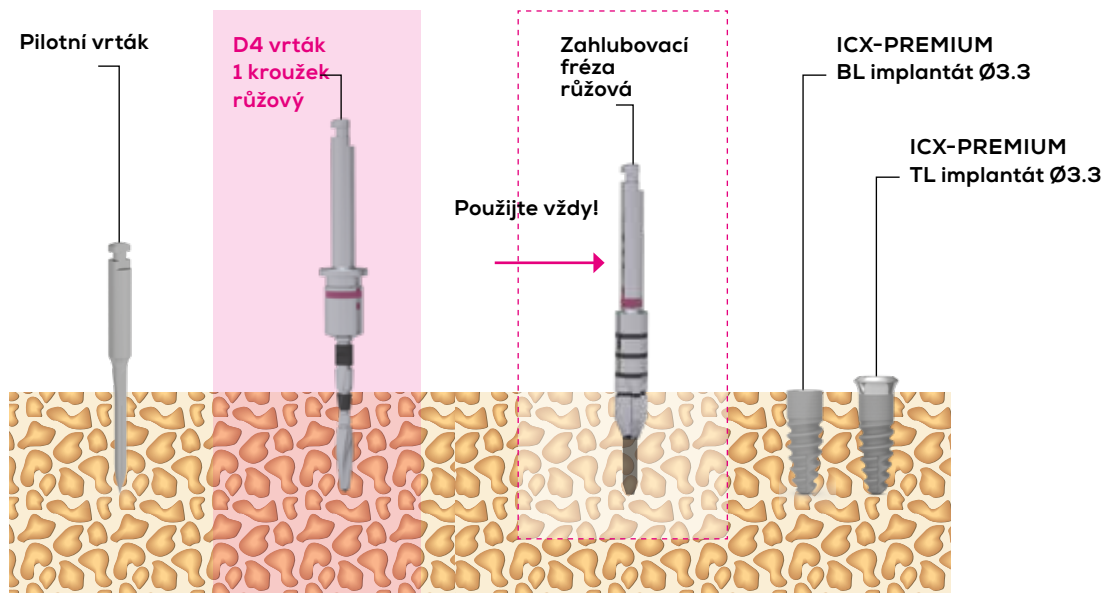

ICX-PREMIUM STANDARDNÍ IMPLANTACE

CHIRURGICKÝ PROTOKOL PRO PRO VELMI MĚKKOU KOST
POUŽÍVEJTE POUZE VRTÁKY S 1 BAREVNÝM KROUŽKEM!




**Důležité upozornění: vrták pro velmi měkkou kost D4
poznáte dle barevného označení = 1 růžový kroužek**



ICX-PREMIUM BL & TL Ø 3.3mm implantáty

Chirurgický postup **ICX-PREMIUM** BL & TL Ø 3.3mm

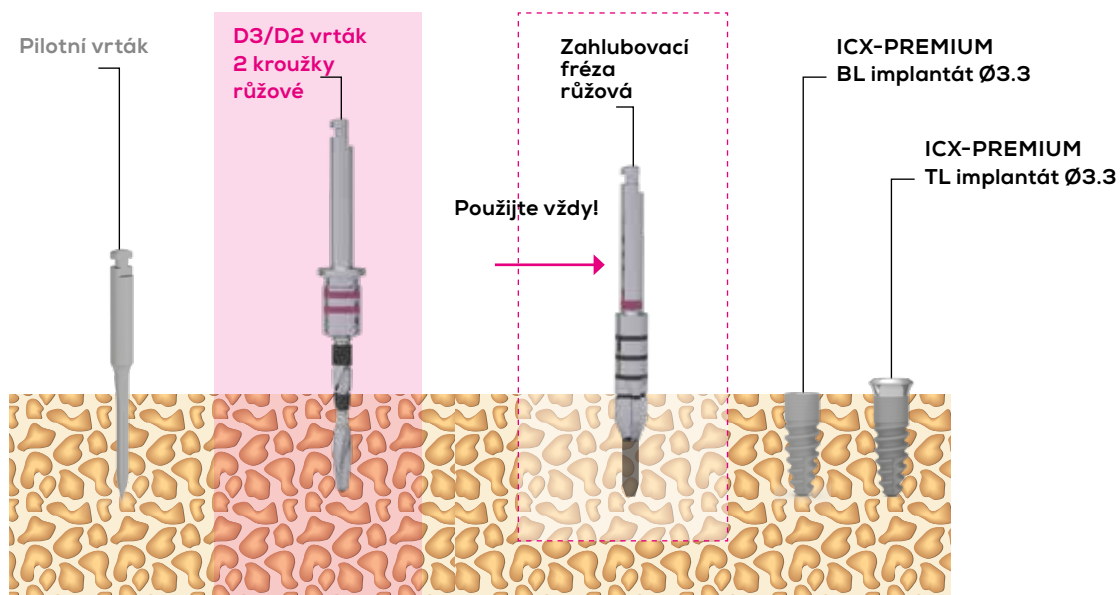

ICX-PREMIUM STANDARDNÍ IMPLANTACE

CHIRURGICKÝ PROTOKOL PRO MĚKKOU/STŘEDNĚ TVRDOU KOST
POUŽÍVEJTE POUZE VRTÁKY SE 2 BAREVNÝMI KROUŽKY!




Důležité upozornění: vrták pro měkkou/středně tvrdou kost poznáte dle barevného označení = 2 růžové kroužky



ICX-PREMIUM BL & TL Ø 3.3mm implantáty

Chirurgický postup **ICX-PREMIUM** BL & TL Ø 3.3mm

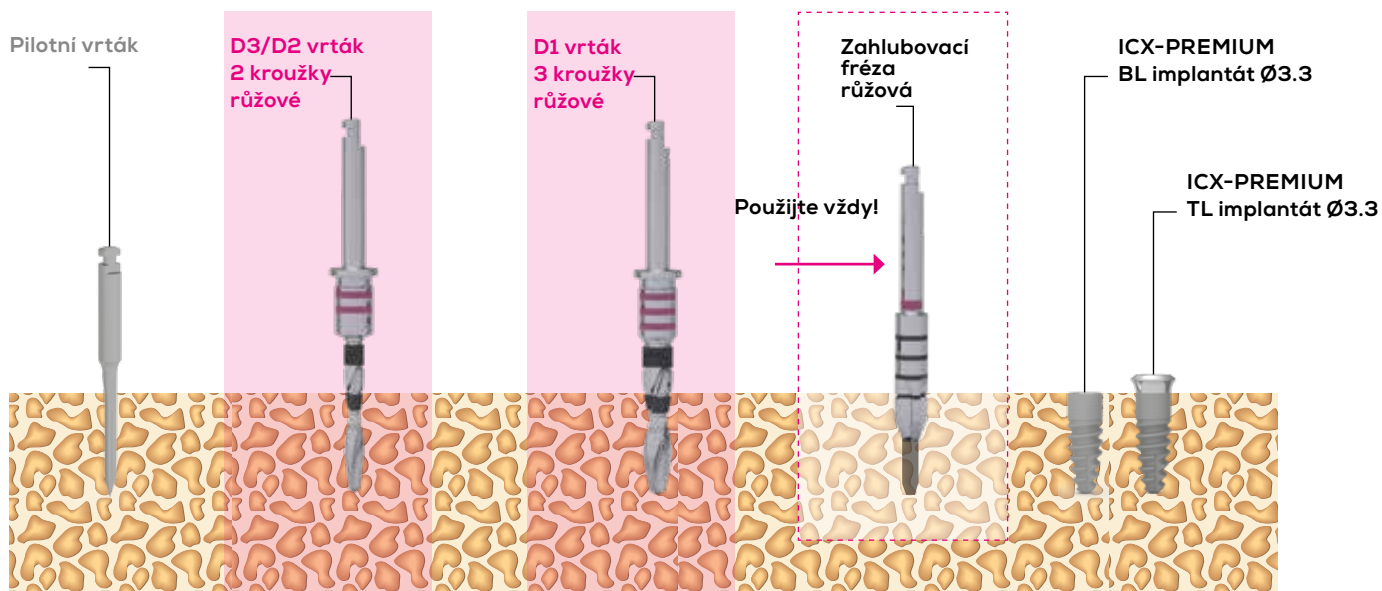

ICX-PREMIUM STANDARDNÍ IMPLANTACE

CHIRURGICKÝ PROTOKOL PRO TVRDOU KOST
POUŽÍVEJTE POUZE VRTÁKY SE 3 BAREVNÝMI KROUŽKY!



**Důležité upozornění: vrták pro tvrdou kost D1
poznáte dle barevného označení = 3 růžové kroužky**



PŘEHLED - CHIRURGICKÝ PROTOKOL

pro ICX-ACTIVE MASTER

BL & TL Ø 3.3mm implantáty

MĚKKÁ KOST

Krok	Popis	Objednací číslo
1	Pilotní vrták	FIL-186RF
2	ICX-ACTIVE 3.3 paralelní vrták měkká kost I	ACM-014-003330
3	ICX-ACTIVE 3.3 zahlubovací fréza	ACM-014-005330

STŘEDNĚ TVRDÁ KOST

Krok	Popis	Objednací číslo
1	Pilotní vrták	FIL-186RF
2	ICX-ACTIVE 3.3 paralelní vrták standard II	ACM-014-006330
3	ICX-ACTIVE 3.3 zahlubovací fréza	ACM-014-005330

TVRDÁ KOST

Krok	Popis	Objednací číslo
1	Pilotní vrták	FIL-186RF
2	ICX-ACTIVE 3.3 paralelní vrták standard II	ACM-014-006330
3	ICX-ACTIVE 3.3 paralelní vrták tvrdá kost III	ACM-014-007330
4	ICX-ACTIVE 3.3 zahlubovací fréza	ACM-014-005330


ICX-3.3 IMPLANTÁT

ACTIVE-MASTER



ICX-ACTIVE MASTER BL & TL Ø 3.3mm implantáty

Chirurgický postup **ICX-ACTIVE MASTER** BL & TL Ø 3.3mm

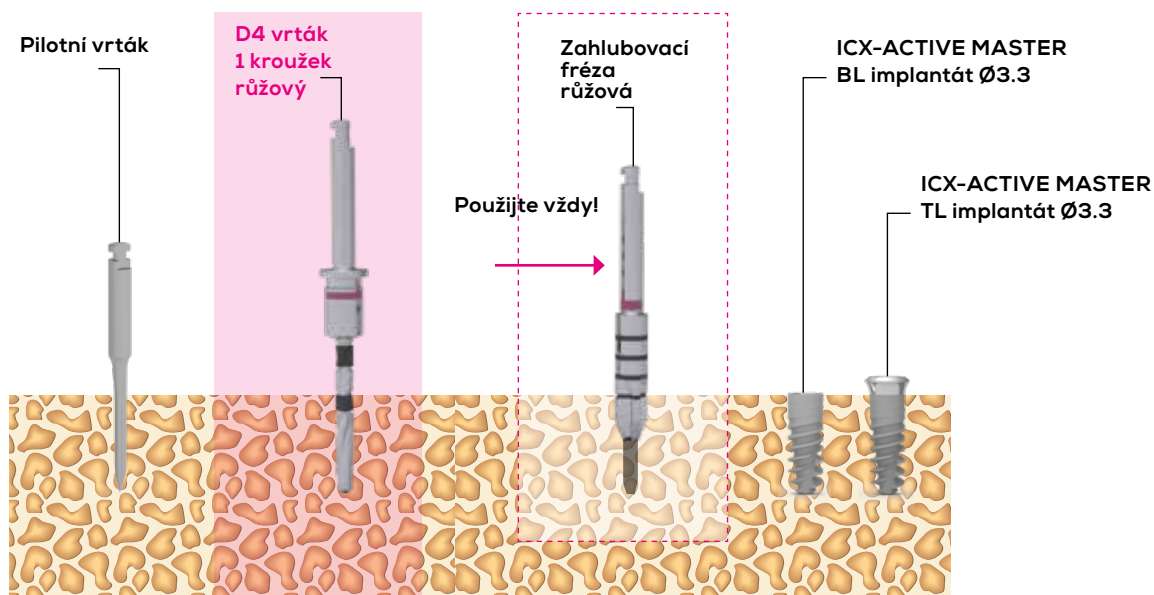

ICX-ACTIVE MASTER

STANDARDNÍ IMPLANTACE

CHIRURGICKÝ PROTOKOL PRO PRO VELMI MĚKKOU KOST




Důležité upozornění: vrták pro velmi měkkou kost D4 poznáte dle barevného označení = 1 růžový kroužek



ICX-ACTIVE MASTER BL & TL Ø 3.3mm implantáty

Chirurgický postup **ICX-ACTIVE MASTER** BL & TL Ø 3.3mm

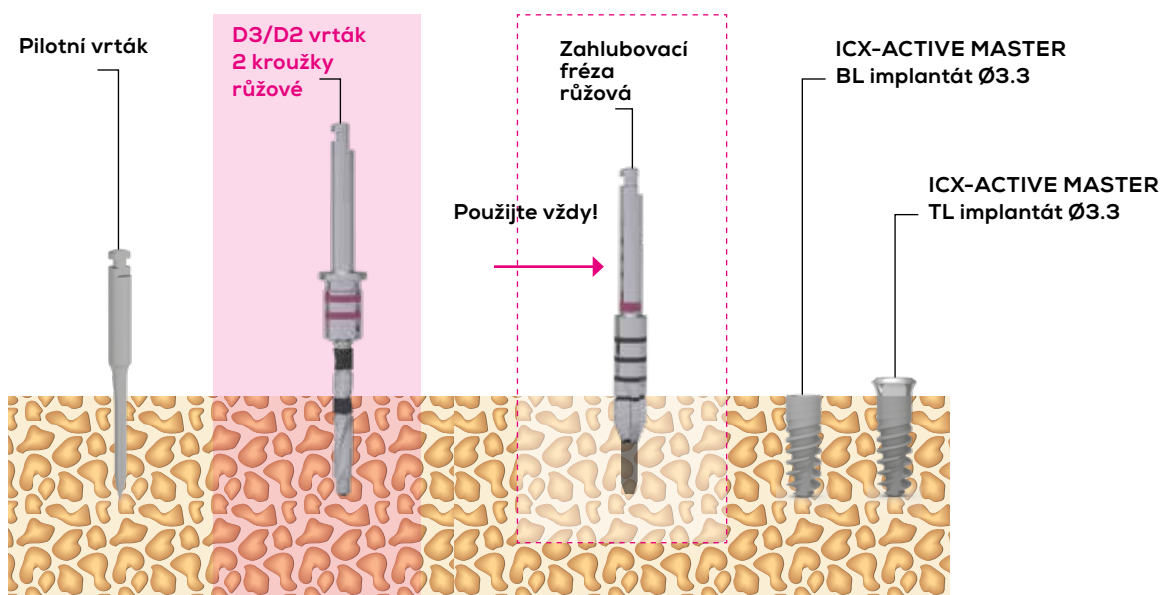

ICX-ACTIVE MASTER

STANDARDNÍ IMPLANTACE

CHIRURGICKÝ PROTOKOL PRO MĚKKOU/STŘEDNĚ TVRDOU KOST
POUŽÍVEJTE POUZE VRTÁKY SE 2 BAREVNÝMI KROUŽKY!




Důležité upozornění: vrták pro měkkou/středně tvrdou kost poznáte dle barevného označení = 2 růžové kroužky



ICX-ACTIVE MASTER BL & TL Ø 3.3mm implantáty

Chirurgický postup **ICX-ACTIVE MASTER** BL & TL Ø 3.3mm

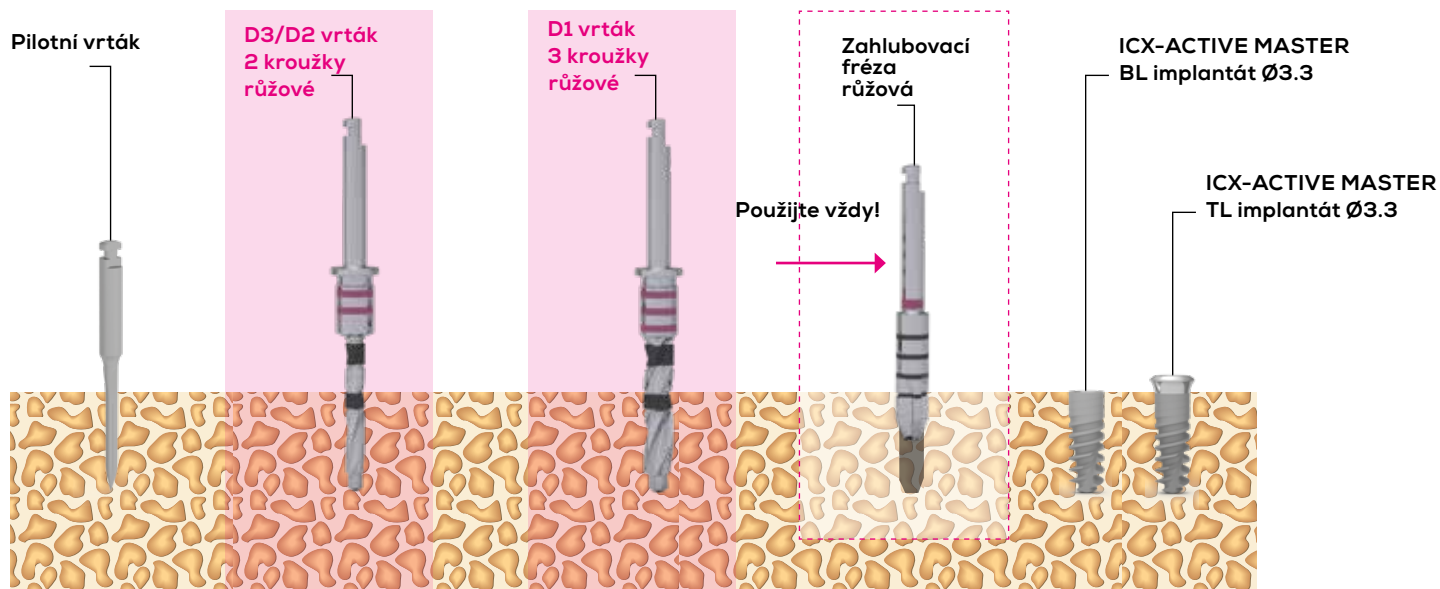

ICX-ACTIVE MASTER STANDARDNÍ IMPLANTACE

CHIRURGICKÝ PROTOKOL PRO TVRDOU KOST
POUŽÍVEJTE POUZE VRTÁKY SE 3 BAREVNÝMI KROUŽKY!



**Důležité upozornění: vrták pro tvrdou kost D1
poznáte dle barevného označení = 3 růžové kroužky**



medentis[®]
medical

*... ENERGIE,
KTERÁ MĚNÍ VIZE V
REALITU*



CHIRURGICKÝ PROTOKOL ICX-3.3 IMPLANTÁT

BL & TL PREMIUM & ACTIVE MASTER



Výrobce: medentis medical GmbH

Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Germany

Výhradní distributor pro ČR a SR:

BIOMED PRAHA, s.r.o.

Pod Pekařkou 107/1 · 147 00 Praha 4 - Podolí

Tel. +420 731 464 759 · e-mail: info@biomed-praha.cz

BE SMART. BE ICX.