

NÁVOD K POUŽITÍ

CHLO-SITE je elastický GEL, který aktivně působí při léčbě parodontálních a periimplantátových kapes/chobotů po mechanickém odstranění plaku. Uzavírací a zvlhčující účinek gelu spolu s působením dvou typů chlorhexidinu zabraňují rekolonizaci bakteriemi. Tímto procesem jsou vytvořeny optimální podmínky pro proces hojení. CHLO-SITE se doporučuje použít v případech těžké a rozsáhlé chronické parodontopatie, protože okluzní působení GELu omezuje rekolonizaci kapes po použití mechanického instrumentária a během periimplantitidy. CHLO-SITE poskytuje ošetřovaným kapsám mechanickou ochranu po dobu dvou týdnů a tím usnadňuje proces hojení.

BALENÍ: Jednodávková injekční stříkačka s 0,25 ml nebo 1 ml xanthanového GELu, který obsahuje směs chlorhexidin diglukonátu a chlorhexidin dihydrochloridu, v poměru 1 ku 2 včetně speciální tupé jehly s bočním otvorem na špičce.

INDIKACE: CHLO-SITE se používá po mechanickém odstranění plaku a resekci kořenového hrotu. Díky zvlhčovací schopnosti a plasticitě speciální matrice GELu je indikován k podpoře léčby parodontózy. CHLO-SITE lze také použít jako nedílnou součást léčby pro ošetření parodontu a periimplantitidy.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Po mechanické instrumentaci povrchu kořene (v případě potřeby lze použít lokální anestetikum), po omytí a osušení místa se CHLO-SITE aplikuje přímo ze stříkačky do každé periodontální nebo periimplantární kapsy vyžadující ošetření. Produkt pečlivě nanášejte tak, aby nejprve vyplnil nejhlubší část kapsy a poté bez přerušení pokračujte až k povrchu. Charakteristika jehly, tupý hrot s bočními otvory, která je součástí balení, usnadňuje aplikaci produktu a zabraňuje traumatizaci a poškození parodontálních tkání v okolí patologického procesu. V případě, že je hloubka kapsy větší než 6 mm, lze dle uvážení zubního lékaře po 30 dnech aplikovat další ošetření CHLO-SITEM. V místě aplikace prochází CHLO-SITE progresivním procesem vstřebávání během 10-30 dnů, takže následná návštěva k odstranění materiálu není nutná. Pacient musí být poučen, aby dodržoval řádnou rutinu ústní hygieny, aby se předešlo případným opakovaným infekcím. Nejsou indikovány žádná zvláštní dietní omezení.

NEŽÁDOUCÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY: Může způsobit přechodné epizody mírné bolesti, nepohodlí dásní a zubů a otoky dásní. Alergické reakce jsou možné u subjektů citlivých na jednu nebo více složek přítomných v produktu.

DOBA EXSPIRACE: Spotřebujte nejlépe do 30 měsíců od data výroby.

UPOZORNĚNÍ: Pouze pro místní aplikaci. Neužívat vnitřně. Pouze pro jednorázové použití, po otevření balení se nesmí znovu použít.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte dobře uzavřené na suchém místě mimo zdroje světla a tepla. CHLO-SITE není nutné uchovávat v chladničce. Při skladování v chladničce při teplotě mezi 4-8°C se však lépe udrží po celou dobu použitelnosti. Držte mimo dosah dětí. Produkt je určen pouze pro dentální použití a musí být používán podle pokynů v návodu. Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobené nesprávným používáním výrobku. Uživatel odpovídá za vhodnost použití produktu, zejména pokud tato použití nejsou uvedena v návodu.

ZÁRUKY: V případě jakýchkoli závad zjištěných v materiálu Ghimas omezuje svou odpovědnost na výměnu nebo vrácení peněz za vadný produkt. Všechny vadné produkty musí být vráceny společnosti Ghimas.

TYTO POKYNY BYLY ZPRACOVÁNY: 01. 10. 2012



Ghimas S.p.A.

Via Cimarosa, 85 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) It

Tel. +39.051.575353 - E-Mail: info@ghimas.it - Web:

www.ghimas.com