



exocad

DIGITALNÍ ICX-WORKFLOW

NASTAVENÍ KNIHOVEN EXOCAD

1. Nepoužívat ICX knihovny, které jsou k dispozici ke stažení přímo v knihovně programu EXOCAD.
2. Vždy stáhnout aktuální knihovny z webových stránek medentis.com
3. Před instalací nejdříve vymazat všechny staré knihovny ICX. Systém totiž vždy používá dříve nahranou verzi.
4. Skenování provádět s ICX CAD/CAM skenovacím tělískem C-030-000003. Při skenování pomocí plastového tělíska 1. generace C-030-000001 se nemusí zobrazit nabídka TissuLevel bázi.
5. Skenovací tělíska od firmy Medentika nejsou kompatibilní s knihovnami medentis.
6. Při práci s ICX-MULTI modelovým analogem C-006-010007 je nutno změnit parametry. V Exocadu je standardně nastavena hodnota 0,8 – tuto je třeba změnit na 0,08 viz obrázek níže.

